



Goldie SVX-20367-06


Kozmetikai kezelőágy arckezelésekhez

Üdvözljük termékeink felhasználóit! Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Cégünk fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül javítsa a dizájnt és módosítsa a termékeket

1. Erről az útmutatóról

Ez a kézikönyv csak referenciaként használható az adott modell üzemeltetéséhez. Ezen útmutató más célra történő felhasználása esetén cégünket ennek következményei és felelőssége nem terheli. Az ebben a kézikönyvben található összes információ szerzői jogvédelem alatt áll, és cégünk írásos engedélye nélkül nem másolható vagy fordítható le jelen specifikáció egyetlen része sem.

2. Figyelmeztetés

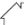- Az elektromos alkatrészek cseréjekor, illetve a készülékek karbantartása és tisztítása során a tápfeszültséget le kell választani.
- A dugaszt megfelelően felszerelt és földelt aljzatba kell bedugni a tűz és az áramütés veszélyének elkerülése érdekében.
- Ne lépjen rá erre a készülékre.
- Ne engedje, hogy gyerekek játszanak a készülékkel, és ne helyezze olyan helyre, ahol gyermekek megérinthetik.
- Távozáskor állítsa a háttámlát a legmagasabb helyzetbe.
- Ne helyezze a készüléket nedves helyre, például fürdőszobába, hogy elkerülje az áramütést vagy más meghibásodást; Tartsa távol a kezelőegységet a víztől is.
- Ne helyezze és ne használja a készüléket olyan helyen, ahol fest/festéket szór vagy oxigéntermelés van.
- Fizikai- és tapintási fogyatékosággal élő, szellemi fogyatékosággal élő személyek, tapasztalatlan, józan ész hiányában szenvedő személyek vagy gyermekek csak akkor használhatják ezt a terméket, ha a személyes biztonságukért felelős személy van jelen, aki figyeli és irányítja őket.
- Ha a csatlakozódugó megsérül vagy bármilyen veszély fennáll, forduljon a forgalmazóhoz, a szervizközponthoz vagy a megfelelő szakértelemmel és tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
- Az ágy kezelésekor ügyeljen arra, hogy az emelési ponton ne legyen elérhető tárgy.
- A műveletet képzett szakembereknek kell elvégezniük
- Eredeti útmutató.
-  Csupán beltéri használatra.

3. Biztonsági óvintézkedések

- Ezt a terméket olyan tapasztalt személy használhatja, aki ismerni a termék felépítését, teljesítményét és használati utasítását, és rendszeresen karbantartja.
- Üzembe helyezéskor, üzemeltetés és beállítás előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg
- Ezt a terméket nem szabad egyoldalú vagy egyponos terhelésre használni
- Tartsa be a biztonsági üzemeltetési szabályokat, a terméket nem szabad túlterhelni, és a termék biztonsági védőfelszerelése teljes körű megbízhatósága érdekében időben szüntesse meg a veszélyes tényezőket.
- Rendszeresen húzza meg a csavarokat és az anyákat, hogy elkerülje a kilazulást, elcsúszást, vibrációt és leesést által okozott meghibásodásokat.
- A karbantartás során a kezelőnek nem szabad tetszőlegesen szétszerelnie az ágy egyetlen részét sem
- Ezt a terméket nem szabad üzemeltetni, ha meghibásodott. Rendellenes jelenség vagy rendellenes hang észlelése esetén azonnal le kell állítani és ellenőrizni kell, és a hiba elhárítása után a munka folytatható.
- A kezelőnek ismernie kell a kézikönyv minden részében leírt megelőző óvintézkedéseket az emberek és a termék biztonsága érdekében.
- Ez a termék háromeres tápkábelrel van felszerelve. A tápkábelt egy megfelelően telepített és földelt háromágú aljzatba kell bedugni. Ez nem csak az áramütés veszélyének elkerülése, hanem a termék megfelelő működése érdekében is szükséges.
- A terméket szigorúan a ráragasztott figyelmeztető címke szerint használni.
- Az emelési művelet során a gombot folyamatosan nyomva kell tartani, amíg a termék el nem éri a megfelelő pozíciót.
- Ügyeljen arra, hogy a folyamatos üzemidő max. 2 perc BEKAPCSOLÁS: 18 perc KIKAPCSOLÁS, amikor a motor jár.
- A karbantartást képzett szakembereknek kell elvégezniük.
- Minden kezelés után csak semleges odatot használjon a por vagy foltok eltávolítására a termékről.
- funkcióval rendelkező termékeknel a kárpit maximális felületi hőmérséklete nem haladja meg a 45°C-ot.
- Az egyes részek beállításakor tartsa távol kezét, lábát és fejét a nyíl által jelzett helyzettől.
- (Amint a képen látható)




4. A termék üzembe helyezése

Helyezze el a terméket a szalon vagy háztartás általános elrendezésének, nappali vagy mesterséges megvilágításának és üzemállapotának megfelelő helyre, és tárolja tiszta, száraz és hűvös környezetben.

1. Nyissa ki a dobozt, és ellenőrizze, hogy a termék sértetlen-e, és hogy a tartozékok és alkatrészek hiánytalanok-e. Ha bármilyen probléma merül fel, forduljon a forgalmazóhoz vagy hozzánk.
2. A termék üzembe helyezése


Helyezze a terméket a megfelelő helyre. Felhívjuk figyelmét, hogy az ágy rögzítéséhez nincs szükség további csavarokra a rögzítéséhez a padlóhoz, mivel az eredeti kialakítás figyelembe vette a stabilitást. A balesetek elkerülése érdekében azonban ügyeljen arra, hogy a terméket szilárd és vízszintes felületre helyezze. Ha a termék az egyenletlen felület miatt elfordul vagy megdől, állítsa be a négy darab műanyag lábat (M10x30) és az anyát (M10), amelyek az alsó panelen vannak rögzítve egy imbuzkulccsal, hogy biztosítsa a termék stabilitását.

Csatlakoztassa megfelelően a termék csatlakozóját az áramforráshoz. (A képen látható módon)

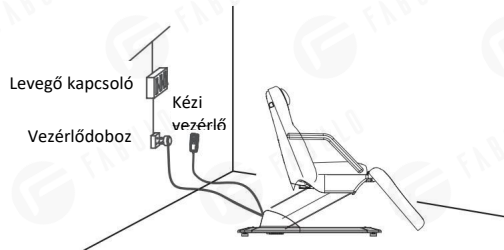

5. A termék felépítése


- Ez a termék vezérlődobozból, motorból, hardverből, műanyag alkatrészekből és bőrből áll. Közülük a vezérlődoboz vezérli a motorok és a kézi vezérlő működését.
- Ez termék rendelkezik a háttámla dőlésszögének, az ülés dőlésszögének és az emelésnek a beállításával, amely egy teljes és integrált szerkezet (amint a képen látható)

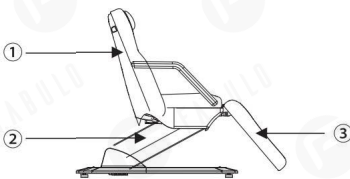


- ① háttámla beállítása
- ② emelés beállítása
- ③ lábtámasz beállítása

6. Használati útmutató

1. Szabványos konfiguráció (Kézi vezérlő)

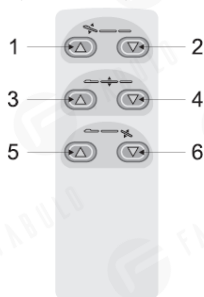

2. Választható konfiguráció (Lábvezérlő)


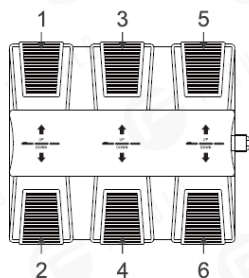


| Sz. | Leírás | Tevékenység |
|-----|---------------------------|---|
| 1 | A háttámla felfelé mozog | A gomb megnyomásával a háttámla fokozatosan felemelkedik. |
| 2 | A háttámla lefelé mozog | A gomb megnyomásával a háttámla fokozatosan lesüllyed. |
| 3 | Emelkedik | A gomb megnyomásával a szék fokozatosan felemelkedik |
| 4 | Süllyed | A gomb megnyomásával a szék fokozatosan lesüllyed |
| 5 | A lábtámasz felfelé mozog | A gomb megnyomásával a lábtámasz felfelé mozdul, szöge minimálisra csökken. |
| 6 | A lábtámasz lefelé mozog | A gomb megnyomásával a lábtámasz lefelé mozdul, szöge maximálisra nő. |

7. Műszaki paraméterek

| | |
|------------------------|--|
| Tápegység | AC 100-120V vagy AC 220-240V vagy AC 100-240V, 50/60Hz |
| Maximális teljesítmény | 300W |
| Környezeti hőmérséklet | 0°C ~ + 40°C |
| Relatív páratartalom | 30% ~ 90% |
| Névleges emelőterhelés | 175kg |


| | |
|-------------------|---|
| Csomagolás mérete | (Stílus 1) 172x65x64,5cm / (Stílus 2) 182x69x64,5cm |
|-------------------|---|

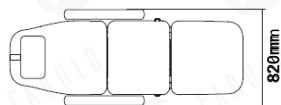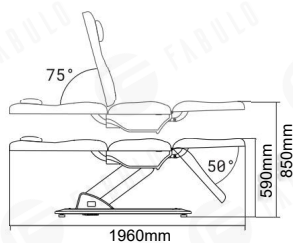

8. Karbantartás

1. Minden kezelés után csak semleges oldatot használjon a por, foltok eltávolítására a bőrön, fémen vagy egyéb alkatrészeken. A fertőtlenítő oldatok, például alkohol, savak vagy lúgos oldatok használata tilos. Ezzel elkerülhető az alkatrészek élettartamának lerövidülése.
2. Rendszeresen (évente egyszer) kenje meg a mozgó alkatrészeket

9. Az áramkörök bekötési rajza

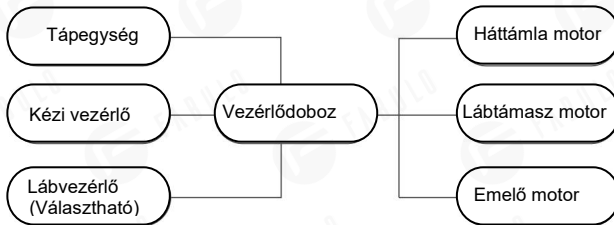

10. Hibaelhárítás

| Hiba leírása | Ok | Megoldás |
|---------------------------------|--|---|
| A motor nem működik megfelelően | 1. A tápkábel ki van húzva, nincs megfelelően csatlakoztatva | 1. Csatlakoztassa a tápkábelt megfelelően. |
| | 2. Rössz minőségű kézi vagy lábvezérlő | 2. Cserélje ki a kézi vagy lábvezérlőt |
| | 3. Alacsony minőségű vezérlődoboz. | 3.A hibaelhárításhoz forduljon a karbantartó központhoz vagy a forgalmazóhoz. |
| | 4. A motor hátsó részének sérülése. | |
| | 5. A motor sérült. | |
| Abnormális hang | 1. A forgórészekből hiányzik a kenőolaj. | 1. Adjon hozzá kenőolajat. |
| | 2. A forgóelemekben (mint zsanérok, POM készletek, gázemelő) hiányzik kenőolaj | 2. Adjon hozzá kenőolajat. |
| | 3. A motor minőségi problémái | 3. Cserélje ki a motort |

Ha a probléma a fenti műveletek után sem oldódik meg, a megoldás érdekében lépjen kapcsolatba a karbantartó központtal vagy a forgalmazóval



Ne dobja a régi vagy hibás készülékeket a háztartási hulladék közé; csak nyilvános gyűjtőhelyeken keresztül szabad likvidálni a terméket.

Használat előtt ellenőrizze a termék specifikációját. Ez a kézikönyv csak referencia. A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül változhatnak.