



Stellar SVX-10362-67


Masszázságy

Üdvözöljük termékeink felhasználóit! Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Cégünk fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül javítsa a dizájnt és módosítsa a termékeket.

1. Erről a használati útmutatóról


Ez a kézikönyv csak referenciaként használható az adott modell üzemeltetéséhez. Ezen útmutató más célra történő felhasználása esetén cégünket ennek következményei és felelőssége nem terheli. Az ebben a kézikönyvben található összes információ szerzői jogvédelem alatt áll, és cégünk írásos engedélye nélkül nem másolható vagy fordítható le jelen specifikáció egyetlen része sem.

2. Figyelmeztetés

- Az elektromos alkatrészek cseréjekor, illetve a készülékek karbantartása és tisztítása során a tápfeszültséget le kell választani.
- A dugaszt megfelelően felszerelt és földelt aljzatba kell bedugni a tűz és az áramütés veszélyének elkerülése érdekében.
- Ne lépjen rá erre a készülékre.
- Ne engedje, hogy gyerekek játszanak a készülékkel, és ne helyezze olyan helyre, ahol gyermekek megérinthetik.
- Távozáskor állítsa a háttámlát a legmagasabb helyzetbe.
- Ne helyezze a készüléket nedves helyre, például fürdőszobába, hogy elkerülje az áramütést vagy más meghibásodást; Tartsa távol a kezelőegységet a víztől is.
- Ne helyezze és ne használja a készüléket olyan helyen, ahol fest/festéket szór vagy oxigéntermelés van.
- Fizikai- és tapintási fogyatékosággal élő, szellemi fogyatékosággal élő személyek, tapasztalatlan, józan ész hiányában szenvedő személyek vagy gyermekek csak akkor használhatják ezt a terméket, ha a személyes biztonságukért felelős személy van jelen, aki figyeli és irányítja őket.
- Ha a csatlakozódugó megsérül vagy bármilyen veszély fennáll, forduljon a forgalmazóhoz, a szervizközponthoz vagy a megfelelő szakértelemmel és tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
- Az ágy kezelésekor ügyeljen arra, hogy az emelési ponton ne legyen elérhető tárgy.
- A műveletet képzett szakembereknek kell elvégezniük
- Eredeti útmutató.
-  Csupán beltéri használatra.


3. Biztonsági óvintézkedések

- Ezt a terméket olyan tapasztalt személy használhatja, aki ismerni a termék felépítését, teljesítményét és használati utasítását, és rendszeresen karbantartja.
- Üzembe helyezés, üzemeltetés és beállítás előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg
- Ezt a terméket nem szabad egyoldalú vagy egyponthoz terhelésre használni
- Tartsa be a biztonsági üzemeltetési szabályokat, a terméket nem szabad túlterhelni, és a termék biztonságos védőfelszerelése teljes körű, megbízhatósága érdekében időben szüntesse meg a veszélyes tényezőket.
- Rendszeresen húzza meg a csavarokat és az anyákat, hogy elkerülje a kilazulás, elcsúszás, vibráció és leesés által okozott meghibásodásokat.
- A karbantartás során a kezelőnek nem szabad tetszőlegesen szétszerelnie az ágy egyetlen részét sem
- Ezt a terméket nem szabad üzemeltetni, ha meghibásodott. Rendellenes jelenség vagy rendellenes hang észlelése esetén azonnal le kell állítani és ellenőrizni kell, és a hiba elhárítása után a munka folytatható.
- A kezelőnek ismernie kell a kézikönyv minden részében leírt megelőző óvintézkedéseket az emberek és a termék biztonsága érdekében.
- Ez a termék háromeres tápkábelrel van felszerelve. A tápkábel egy megfelelően telepített és földelt háromágú aljzatba kell bedugni. Ez nem csak az áramütés veszélyének elkerülése, hanem a termék megfelelő működése érdekében is szükséges.
- A terméket szigorúan a ráragasztott figyelmeztető címke szerint használni.
- Az emelési művelet során a gombot folyamatosan nyomva kell tartani, amíg a termék el nem éri a megfelelő pozíciót.
- Ügyeljen arra, hogy a folyamatos üzemidő max. 2 perc BEKAPCSOLÁS: 18 perc KIKAPCSOLÁS, amikor a motor jár.
- A karbantartást képzett szakembereknek kell elvégezniük.
- Minden kezelés után csak semleges oldatot használjon a por vagy foltok eltávolítására a termékről.
- Az egyes részek beállításakor tartsa távol kezét, lábát és fejét a nyíl által jelzett helyzettől. (A képen látható módon)

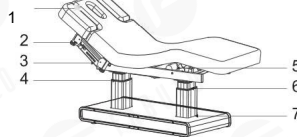

4. A termék üzembe helyezése

1. Helyezze el a terméket a szalon vagy háztartás általános elrendezésének, nappali vagy mesterséges megvilágításának és üzemállapotának megfelelő helyre, és tárolja tiszta, száraz és hűvös környezetben.
2. Nyissa ki a dobozt, és ellenőrizze, hogy a termék sértetlen-e, és hogy a tartozékok és alkatrészek hiánytalanok-e. Ha bármilyen probléma merül fel, forduljon a forgalmazóhoz vagy hozzánk.
3. A termék üzembe helyezése
Helyezze a terméket a megfelelő helyre. Felhívjuk figyelmét, hogy az ágy rögzítéséhez nincs szükség további csavarokra a rögzítéséhez a padlóhoz, mivel az eredeti kialakítás figyelembe vette a stabilitást. A balesetek elkerülése érdekében azonban ügyeljen arra, hogy a terméket szilárd és vízszintes felületre helyezze. Ha a termék az egyenetlen felület miatt elfordul vagy megdől, állítsa be a négy darab műanyag lábat (M10x30) és az anyát (M10), amelyek az alsó panelen vannak rögzítve egy imbuszkulccsal, hogy biztosítsa a termék stabilitását.
Csatlakoztassa megfelelően a termék csatlakozóját az áramforráshoz. (A képen látható módon)

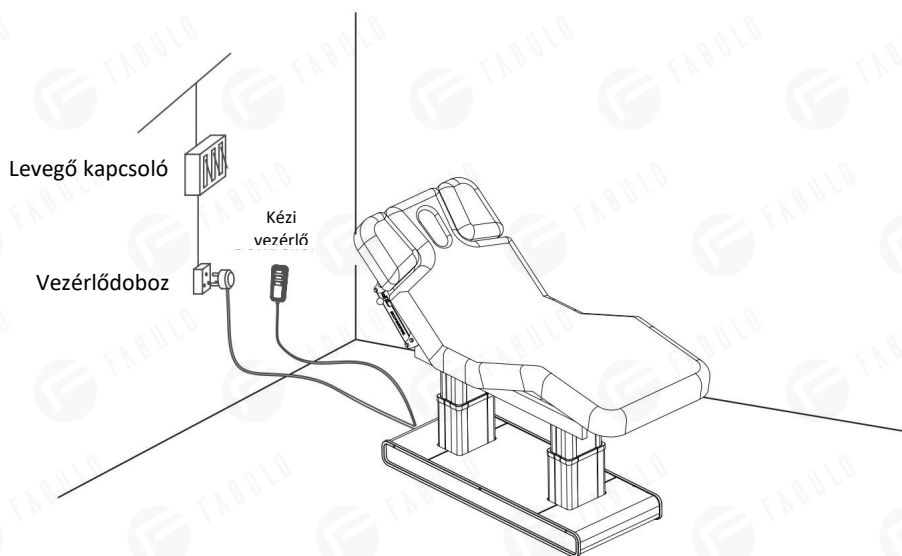


5. A termék felépítése

- Ez a termék vezérlődobozból, motorból, fa részből, hardverből, műanyag részekből és bőrből áll.

Közülük a vezérlődoboz vezérli a motorok és a kézi vezérlő működését.


- Ez termék rendelkezik a háttámla dőlésszögének, az ülés dőlésszögének és az emelésnek a beállításával, amely egy teljes és integrált szerkezet (amint a képen látható)

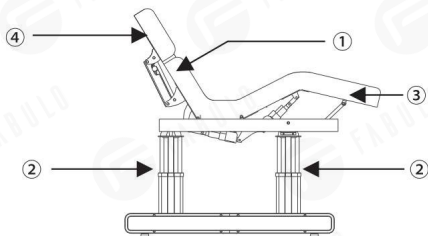

- ① háttámla beállítása
- ② emelés beállítása
- ③ lábtámasz beállítása
- ④ kartámasz beállítása (manuálisan)

6. Használati útmutató

Választható konfiguráció (Kézi vezérlő)

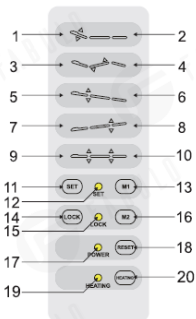

Sz.	Leírás	Tevékenység
1	A háttámla felfelé mozog	A gomb megnyomásával a háttámla fokozatosan felemelkedik.
2	A háttámla lefelé mozog	A gomb megnyomásával a háttámla fokozatosan lesüllyed.
3	A lábtámasz felfelé mozog	A gomb megnyomásával a lábtámasz felfelé mozdul, szöge minimálisra csökken.
4	A lábtámasz lefelé mozog	A gomb megnyomásával a lábtámasz lefelé mozdul, szöge maximálisra nő.
5	Felfele dől pozitív szögben	A gomb megnyomásával az ülés dőlésszöge fokozatosan emelkedik pozitív irányban.
6	Lefele dől pozitív szögben	A gomb megnyomásával az ülés dőlésszöge fokozatosan csökken pozitív irányban.
7	Felfele dől negatív szögben	A gomb megnyomásával az ülés dőlésszöge fokozatosan emelkedik negatív irányban.
8	Lefele dől negatív szögben	A gomb megnyomásával az ülés dőlésszöge fokozatosan csökken negatív irányban.
9	Emelkedik	A gomb megnyomásával a szék fokozatosan felemelkedik
10	Süllyed	A gomb megnyomásával a szék fokozatosan lesüllyed.
11	Adja meg a helyzeti memória beállítását (választható)	A jelzőfény a gomb 2 másodperces lenyomása után világít, majd belép a pozíciómémória beállítási állapotába.
12	A memória funkció jelzőfénye (választható)	
13	A helyzeti memória beállítása 1 (választható)	<p>1. Nyomja meg a "SET" gombot 2 másodpercig, amikor a jelzőfény kigyullad, állítsa be a széket/asztalt arra, amit programoznia kell. Nyomja meg az "M1"/"M2" gombot a memória funkció beállításának befejezéséhez.</p> <p>2. A jelzőfény kialszik, nyomja meg az "M1"/"M2" gombot, a termék automatikusan a memorizált "M1"/"M2" pozícióba lép.</p>

Č.	Leírás	Tevékenység
14	Biztonsági gomb	Nyomja meg és tartsa lenyomva a „biztonsági zár” gombot körülbelül két másodpercig, a gomb körüli piros lámpa kigyullad, a biztonsági zár gombon kívül egyetlen gomb sem használható. Nyomja meg ismét a biztonsági zár gombot körülbelül két másodpercig, a piros gomb lámpája kialszanok, és minden gomb visszatér a normál működéshez.
15	A biztonsági gomb jelzőfénye	
16	A helyzeti memória beállítása 2 (választható)	1. Nyomja meg a "SET" gombot 2 másodpercig, amikor a jelzőfény kigyullad, állítsa be a széket/asztalt arra, amit programoznia kell. Nyomja meg az "M1"/"M2" gombot a memória funkció beállításának befejezéséhez. 2. A jelzőfény kialszik, nyomja meg az "M1"/"M2" gombot, a termék automatikusan a memorizált "M1"/"M2" pozícióba lép.
17	Töltés jelzőfénye	A kézi vezérlő megfelelően csatlakozik az áramforráshoz, a lámpa világít. Ellenkező esetben a lámpának ki kell aludnia.
18	Újraindítás gomb egyetlen gombnyomással (reset)	Nyomja meg a gombot, az ágy magassága automatikusan eléri a legalacsonyabb pozíciót.
19	Melegítés funkció jelzőfénye (választható)	Nyomja meg a gombot, a jelzőfény bekapcsol, a melegítés funkció működik; Nyomja meg újra a gombot, a jelzőfény kialszik, a melegítés funkció leáll.
20	Melegítés (választható)	


Megjegyzés:

1. A melegítés funkció csak a melegítés funkcióval rendelkező modelleknél.
2. Különböző kézi vezérlőket kell kiválasztani a konfigurációknak megfelelően.

Világítás beállítása

Kézi vezérlős irányítás





1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a "SET"/"LOCK" gombot 2 másodpercig, hogy belépjen a világítás szabályozási módba
2. Nyomja meg az "M1" gombot a világítási mód kiválasztásához (összesen 16 féle mód)
3. Nyomja meg az "M2" gombot a fényerő beállításához (összesen 12 fok)
4. A világítási mód és a fényerő kiválasztása után nyomja meg és tartsa lenyomva a "SET"/"LOCK" gombot a világítás beállításának befejezéséhez.

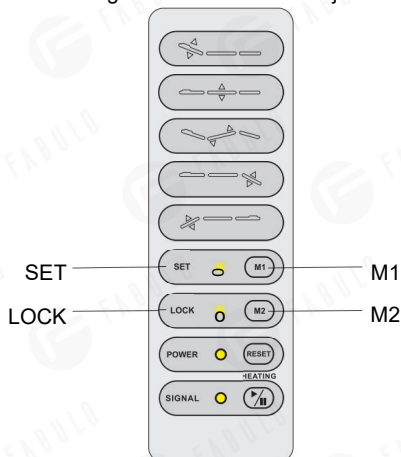

7. Műszaki paraméterek

Tápegység	AC 100-120V vagy AC 220-240V vagy AC 100-240V, 50/60Hz
Maximális teljesítmény	300W
Környezeti hőmérséklet	0°C ~ + 40°C
Relatív páratartalom	30% ~ 90%
Névleges emelőterhelés	175kg
Csomagolás mérete	204x81x74cm


SVX-10362-67

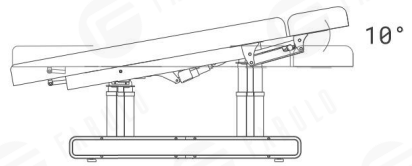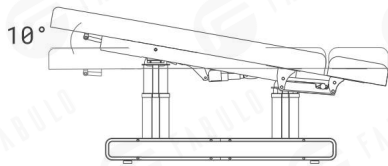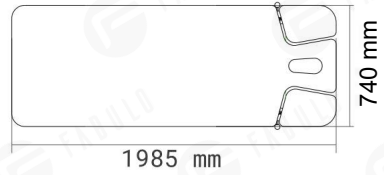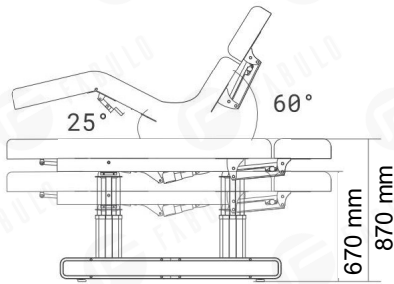

8. Karbantartás

1. Minden kezelés után csak semleges oldatot használjon a por, foltok eltávolítására a bőrön, fémen vagy egyéb alkatrészeken. A fertőtlenítő oldatok, például alkohol, savak vagy lúgos oldatok használata tilos. Ezzel elkerülhető az alkatrészek élettartamának lerövidülése.
2. Rendszeresen (évente egyszer) kenje meg a mozgó alkatrészeket
3. Használat után a kárpitot 180°-os szögben tartsa, hogy elkerülje a redőzést és a gyűrődést.

9. Bekötési rajz

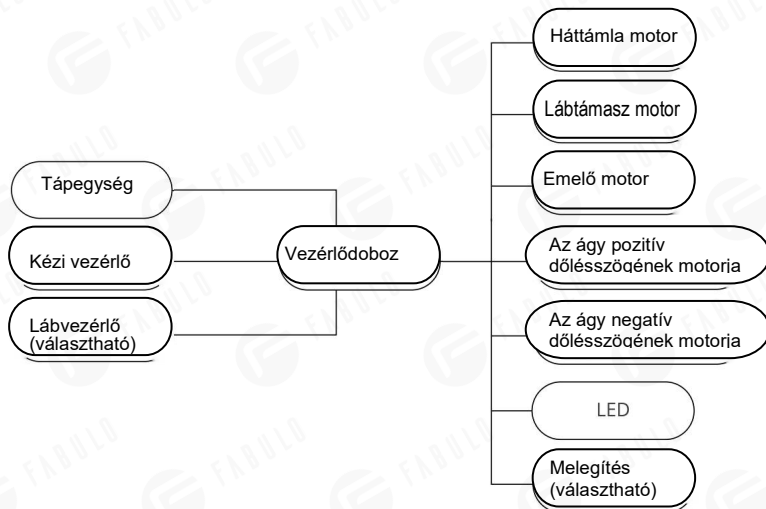

10. Hibaelhárítás

Hiba leírása	Ok	Megoldás
A motor nem működik megfelelően	1. A tápkábel ki van húzva, nincs megfelelően csatlakoztatva.	1. Csatlakoztassa a tápkábelt megfelelően.
	2. Rossz minőségű kézi vagy lábvezérlő.	2. Cserélje ki a kézi vagy lábvezérlőt
	3. Alacsony minőségű vezérlődoboz.	3.A hibaelhárításhoz forduljon a karbantartó központhoz vagy a forgalmazóhoz.
	4. A motor hátsó részének sérülése.	
	5. A motor sérült.	
	6. A gomb megnyomása után az ágy nem mozdul	<p>1. Mozgassa a mozgatható lábtartót a rögzített lábtartó közelébe, ellenőrizze, hogy a végálláskapcsoló zárva van-e, majd nyomja meg újra a gombokat.</p> <p>2. Nyissa ki a rögzített lábtartó fedelét és a háttámla fedelét, ellenőrizze a tápkábel mindkét végét, hogy nem lazul-e meg, ha a fenti helyzet előfordul, csatlakoztassa újra.</p> <p>3. Ha a probléma a fenti műveletek után sem oldódik meg, forduljon a karbantartó központhoz vagy a forgalmazóhoz a megoldás érdekében.</p>
Abnormális hang	1. A forgórészekből hiányzik a kenőolaj.	1. Adjon hozzá kenőolajat.
	2. A forgóelemekben (mint zsanérok, POM készletek, gázemelő) hiányzik a kenőolaj	2. Adjon hozzá kenőolajat.
	3. A motor minőségi problémái	3. Cserélje ki a motort.

Ha a probléma a fenti műveletek után sem oldódik meg, a megoldás érdekében lépjen kapcsolatba a karbantartó központtal vagy a forgalmazóval



Ne dobja a régi vagy hibás készülékeit a háztartási hulladék közé; csak nyilvános gyűjtőhelyeken keresztül szabad likvidálni a terméket.

Használat előtt ellenőrizze a termék specifikációját. Ez a kézikönyv csak referencia. A műszaki paraméterek előzetes értesítés nélkül változhatnak.