



SVX-20373-06

SVX-20374-06

Kozmetikai készülék

Használati útmutató

F-362 / F-364

Üdvözöljük termékeink felhasználóit!

Kérjük, a termékek használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Vállalatunk fenntartja magának a jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül javítson a formatervezésen és módosítsa a termékeket.

Tartalomjegyzék



Erről az útmutatóról	1
Biztonsági utasítások	1
A termék műszaki adatai és ismerkedés az F-362-vel	2/3
A termék műszaki adatai és ismerkedés az F-363-mal	4/5
A termék műszaki adatai és ismerkedés az F-364-gyel	6/7
A termék műszaki adatai és ismerkedés az F-365-tel	8/9
A hideg-meleg arcvasaló ismertetése	10/11
Az ultrahangos szonda ismertetése	12/13
A Skin Scrubber ismertetése	14/15
A rádiófrekvenciás kezelés ismertetése	16/17
A gyémántfejes mikrodermabráziós kezelés ismertetése	18/19
A vákuum/porlasztófej ismertetése	20/21
A nagyfrekvenciás elektroterápia ismertetése	22/23
A forgó tisztítókefe ismertetése	24/25
Az elektrogógykezelés ismertetése	26/27
Megelőző intézkedések a RES és CAP működtetésével kapcsolatban	28
A RES ismertetése	29
A CAP ismertetése	30
Hibaelhárítás és problémák megoldása	31

Err l az útmutatóról

Ez a kézikönyv tájékoztató jellegű használati információkkal szolgál az adott modell rendeltetésszerű üzemeltetéséhez. Ha a kézikönyvet más célokra használják fel, cégünket semmilyen vonatkozó követelmény és felelősség nem terheli. Az ebben a kézikönyvben található összes információ szerzői jogvédelem alatt áll, és jelen specifikáció cégünk írásos engedélye nélkül nem másolható vagy fordítható le egyetlen részletben sem.

Biztonsági utasítások

A termék megfelel és biztonságos használatának biztosítása érdekében használat el tt olvassa el az összes utasítást! Kérjük, tartsa be az összes biztonsági óvintézkedést!

 Figyelmeztetés!		<p>Potenciális veszélyt képvisel helyzetek, amelyek akár súlyos életveszéllyel is járhatnak, ha nem kerülnek el.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ez a termék kizárólag szakmai képzéssel rendelkező kozmetikusok számára készült.• A meghibásodás és a veszély elkerülése érdekében ne használja vagy tárolja a terméket nedves helyen, például fürdőszobában.• Ne használja ezt a terméket gyúlékony anyagok (pl. alkohol, higító, benzín, körömlakkle mosó, spray stb.) közelében.• Ne használja a terméket az alábbi körülmények között: amikor a tápkábel vagy a csatlakozó sérült vagy forró sodik; ha a csatlakozódugó kilazul a konnektorban.• Ne tevékenykedjen nedves kézzel a tápkábel csatlakoztatása és a termék használata közben.• Győződjön meg arról, hogy a termék üzemi feszültsége megegyezik a névleges feszültségével.• Használat előtt a veszély elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a tápkábel dugója és csatlakozója teljesen be van nyomva.• Amikor nem használja a terméket, kapcsolja ki a tápellátást, és húzza ki a csatlakozódugót.• Rendszeresen tisztítsa meg a tápkábel dugóját és csatlakozóját, hogy elkerülje a nedvesség, por és egyéb tényezők által okozott szigetelési hibákat.• Ügyeljen arra, hogy a termékhez a megfelelő tápkábelkészletet használja. Ne használja ezt a tápkábelkészletet semmilyen más eszközzel.• Ne tekerje a tápkábelt a készülék köré, különben a tápkábel deformálódhat és megsérülhet.• Tárolja gyermekek számára nem elérhető helyen. Ne engedje, hogy gyermekek használják ezt a terméket.• Ne módosítson a beállításokon, szerelje szét vagy javítsa a terméket saját maga. Ellenőrzés és javítás céljából forduljon a gyártóhoz, annak képviselőjéhez vagy profi szervizelő szakemberhez, a veszély elkerülése érdekében.• Ha a csatlakozódugó megsérül, vagy bármilyen egyéb veszély fennállása esetén forduljon a forgalmazóhoz, a szervizközponthoz vagy megfelelő szakértelemmel és tapasztalattal rendelkező szakemberhez.• Ügyeljen arra, hogy ezt a terméket a kézikönyvben leírt céloknak megfelelően használja. Ne használjon a gyártó által nem ajánlott tartozékokat.
 Vigyázat!		<p>Potenciális veszélyt képvisel helyzetek, amelyek általában személyi sérüléshez vezethetnek, ha nem kerülnek el.</p> <ul style="list-style-type: none">• A készülék kezelőinek különös figyelmet kell fordítaniuk a személyek és a berendezések biztonságára a használat során.• Ha a termék nem működik megfelelően, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon a gyártóhoz vagy az értékesítőhöz a megoldás érdekében.• Ezt a terméket és a kapcsolódó tartozékokat óvatosan kell kezelni.• A balesetek (például a csecsemők fulladása) elkerülése érdekében bánjon megfontoltan a termék csomagolózsákjával, és tartsa távol a gyermekektől.


Komponensek

◆ SVX-20373-06



1. Gyémántfejes mikrodermabrázió
2. Rádiófrekvencia
3. Ultrahang
4. Scrubber
5. Hideg-meleg kalapács

Főegység

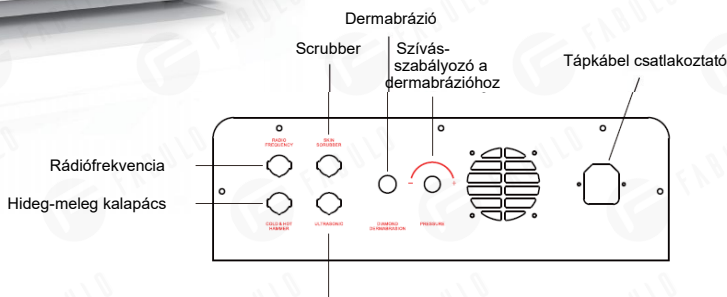

Hátsó panel

◆ Vezérlő panel

1. Hideg-meleg kalapács
2. Ultrahang
3. Scrubber
4. Rádiófrekvencia
5. Gyémántfejes mikrodermabrázió



◆ Üzemeltetés

Üzemeltetés lépései

- ① Kattintással válassza ki a vezérlő interfészen a kívánt funkciót, és lépjen be a megfelelő funkciófelületre.
- ② Minden munkafelületen van egy gomb, amellyel visszatérhet a fő kezelőfelületre.

Műszaki paraméterek

A készülék modellje	SVX-20373-06
Névleges feszültség/Frekvencia	AC 100-240V,50/60HZ
Teljesítmény	60W
Nettó tömeg	6.1kg
A termék mérete	37x31.5x16.5cm
Csomagolás nagysága	56.8x52.5x23.5cm
Csomag tartalma	Főegység x 1
	Tartópolc a tartozékoknak x 1
	Hideg-meleg kalapács x 1
	Ultrahangos szonda x 1
	Scrubber x 1
	Rádiófrekvencia x 1
	Mikrodermabrázió (9 db-os szett) x 1
	Csavarhúzó x 1
	Csavarok (M4) x 2
	Felhasználói kézikönyv x 1
Hálózati tápkábel x 1	


Komponensek

◆ SVX-20374-06



1. Porlasztó
2. Vákuum
3. Rádiófrekvencia
4. Ultrahang
5. Nagyfrekvencia
6. Hideg-meleg kalapács


Főegység

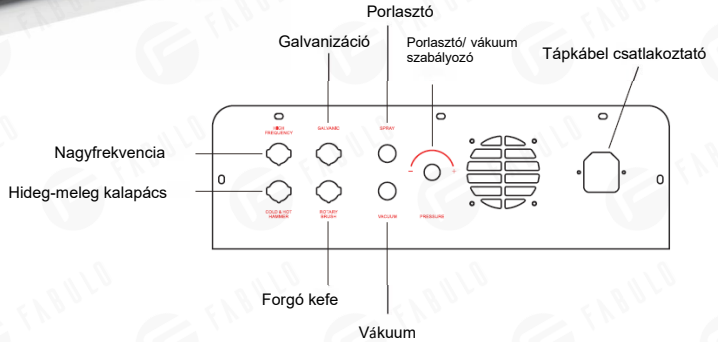

Hátsó panel

◆ Vezérlő panel

1. Hideg-meleg kalapács
2. Nagyfrekvencia
3. Forgó kefe
4. Galvanizáció
5. Porlasztó /Vákuum

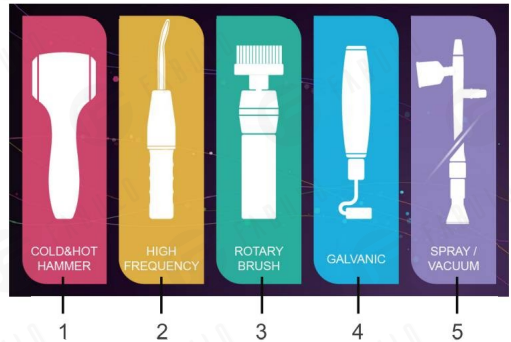

◆ Üzemeltetés

Üzemeltetés lépései

- ① Kattintással válassza ki a vezérlő interfészen a kívánt funkciót, és lépjen be a megfelelő funkciófelületre.
- ② Minden munkafelületen van egy gomb, amellyel visszatérhet a fő kezelőfelületre.

Műszaki paraméterek

A készülék modellje	F-364
Névleges feszültség/Frekvencia	AC 100-120V,50/60HZ; AC 220-240V,50/60Hz
Teljesítmény	60W
Nettó tömeg	6.3kg
A termék mérete	37x31.5x16.5cm
Csomagolás nagysága	56.8x52.5x23.5cm
Csomag tartalma	Főegység x 1
	Tartópolec a tartozékoknak x 1
	Hideg-meleg kalapács x 1
	Nagyfrekvenciás szonda (4 fajta kezelőfej) x 1
	Forgó kefe (4 fajta kezelőfej) x 1
	Galvanikus szonda x 1
	Vákuum (3 fajta szívófej) x 1
	Porlasztó x 1
	Csavarhúzó x 1
	Csavarok (M4) x 2
	Felhasználói kézikönyv x 1
Hálózati tápkábel x 1	



Hideg-meleg kalapács

◆ Üzemeltetési utasítások

Figyelmeztetés

- Ezt a funkciót a következő személyek vagy testfelületek esetében tilos használni:
 - 1 Ismétlődő hegesedő bőrkiütésben szenvedő és allergiás betegek;
 - 2 Égési sérülések, kidörzsölés, napégés, gyulladás vagy egyéb sebek;
 - 3 Immunszuppresszív betegségekben szenvedők, alacsony immunitású, vagy immunszuppresszív gyógyszereket fogyasztó emberek;
 - 4 Az elmúlt 3 hónapban történő sebészeti beavatkozások helye.
- A kozmetikusok nem hagyhatják felügyelet nélkül üzembe helyezve a kalapácsot, nehogy balesetet okozzanak.

Vigyázat


- A hideg-meleg kalapács csak beltérben használható, és célszerű bent 25°C körüli hőmérsékletnek lennie, mivel működését befolyásolja a környezet hőmérséklete, így pl. kültérben, illetve túl magas vagy túl alacsony környező hőmérsékleten történő használat esetén előfordulhat, hogy nem éri el a szükséges üzemi hőmérsékletet, és így nem éri el a várt kezelési hatást.
- Minden alkalommal, amikor bekapcsolja a kozmetikai készüléket, és a hideg-meleg kalapács funkciót szeretné használni, várnia kell egy ideig, amíg a hideg-meleg kalapács eléri az előre beállított hőmérsékletet. Normál körülmények között indításkor a hőmérséklet emelkedésének és csökkenésének ideje körülbelül 5 perc; A meleg és a hideg funkció közötti váltáskor a hőmérséklet körülbelül 3 perc alatt emelkedik és csökken a kívánt értékre.
- Használat közben a hideg-meleg kalapács légrései nem szabad elzárni, hogy ne képződjenek kondenzvízcseppek a hideg-meleg kalapácsban, és ne vezessen rövidzárlati meghibásodáshoz.
- Használat közben a hideg-meleg kalapácsnak közel kell lennie a bőrhöz, a homlokot és a járomcsontot csak enyhén kezelje.
- Ha a hideg-meleg kalapács hőmérséklete magas, ne hagyja abba a bőrön való mozgatását.
- Ne használja a hideg-meleg kalapácsot ütögetéssel.
- Ha a kezelőfej mindkét oldalán karcolások találhatók, használat előtt cserélje ki egy új tartozékra.
 - Ne feszítse meg a hideg-meleg kalapács rugós kábeljét, ügyeljen a használható hossztartományra.

Ajánlott használati időtartam

Igazítsa az időtartamot a kezelt terület és a bőr sajátos jellemzőinek megfelelően, általában az egész arcra 10-15 perc a műveleti idő.



Hideg-meleg kalapács

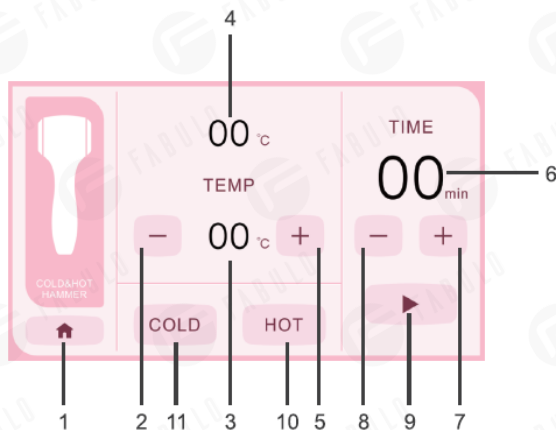

1. Visszatérés a fő kezelőfelületre
2. Gomb a hőmérséklet csökkentésére
Hideg kezelés tartománya: 5°C~25°C
Meleg kezelés tartománya: 25°C~45°C
3. Hőmérséklet megjelenítése

A hideg vasalási mód kiválasztása esetén a kijelzett hőmérséklet a hűtés mértékét jelzi.

A meleg vasalási mód kiválasztásakor a kijelzett hőmérséklet a beállított melegítés mértékét jelzi.

4. A hideg-meleg kalapács aktuális kimeneti hőmérséklete
A hűtési mód kiválasztásakor a kalapács hideg oldalának aktuális kimeneti hőmérséklete jelenik meg.
A melegítési mód kiválasztásakor a kalapács meleg oldalának aktuális kimeneti hőmérséklete jelenik meg.

5. Gomb a hőmérséklet növelésére
Hideg kezelés tartománya: 5°C~25°C
Meleg kezelés tartománya: 25°C ~ 45°C

6. Idő kijelzése
A működési idő visszaszámlálása a működés indításakor megkezdődik. A készülék automatikusan leáll, ha az idő eléri a nullát.

7. Működési idő meghosszabbítása
Működési idő tartománya: 1 ~ 30 perc.

8. Működési idő lerövidítése
Működési idő tartománya: 1 ~ 30 perc.

9. Indítás/leállítás.
10. Meleg vasalási mód
11. Hideg vasalási mód

◆ Üzemeltetés módja

- 1) Válassza ki a hűtési vagy melegítési módot;
- 2) Állítsa be az üzemi hőmérsékletet és a működési idő hosszát. A beállítható maximális idő 30 perc.
- 3) Vegye elő a hideg-meleg kalapácsot, és kapcsolja be a fogantyún lévő kapcsolót.
- 4) Indítsa el a funkciót a Start gomb megnyomásával
- 5) Ellenőrizze és erősítse meg, hogy a kijelzőn látható hőmérséklet megfelel-e a beállított hőmérsékletnek. Ha igen, érintse meg, és ellenőrizze a bőrével. Ha már megfelelőnek tartja a hőmérsékletet, akkor közvetlenül használhatja, ellenkező esetben igazítson rajta.
- 6) Az betervezett idő letelte után a kalapács automatikusan leáll. Tisztítsa meg, és tegye vissza a tartozékok polcára.



Ultrahangos szonda (csak kozmetikai használatra)

Üzemeltetési utasítások



Figyelmeztetés

- Ne irányítsa a szondát közvetlenül a szemgolyóra, ne érintse meg a szemet és ne masszírozza a felső szemhéjat.
- Tilos a következő embercsoportok számára:
 - ① Terhes nők és szívritmus-szabályozóval rendelkező nők;
 - ② Rákos megbetegedésben és súlyos szívbetegségben szenvedő páciensek;
 - ③ Égési sérülések, kidörzsölés, napégés, gyulladás vagy egyéb sebek;
 - ④ Allergiás betegek és kontakt dermatitiszben szenvedők.
- Tilos a szondát bekapcsolni kozmetikai célokon kívül, hogy elkerüljük a magas hőmérséklet miatti leforrzás veszélyét, és ne hogy csökkentsük a szonda túlmelegedés miatti élettartamát.
- Ne távolítsa el a rozsdamentes acél alkatrészt a fogantyúról. Ha elfordítja a rozsdamentes acél szondát és a fogantyút, a szonda megsérülhet.
- Ezt a funkciót kizárólag kozmetikai célokra szabad használni.



Vigyázat

- A kezelés előtt elegendő mennyiségű krém vagy esszenciát kell felvinni a kezelt területre, hogy megfelelő közeg legyen a szonda és a bőr között, hogy a bőr ne feszüljön meg túlságosan.
- Használatkor a szondának közel kell lennie a bőrhöz, hogy elkerülje a kavitációt és a bőrkárosodást.
- A szonda nem lehet üzembe helyezve anélkül, hogy rendeltetésszerűen használná, különben a szonda megsérülhet vagy élettartama csökkenhet.
- Ha a szonda túl forró, megégeti a bőrt, ezért a használati idő ne haladja meg a 15 percet, érzékeny bőr esetén a használati időt és az energiaszintet csökkenteni kell. A használat időtartamának meghosszabbítása nem növeli a kezelés hatását, ellenkezőleg veszélyes lehet. Figyelni kell a bőrápolás felületére, ne tartsa egy helyen 5 másodpercet meghaladóan.
- Kezelés után a bőrön rövid ideig gyulladásra hasonlító kivörösödés jelentkezhet a szonda rezgései és a hőképződés következtében, ami fokozza a vérkeringést, ez normális állapot.


Ajánlott használati időtartam

Igazítsa az időtartamot a kezelt terület és a bőr sajátos jellemzőinek megfelelően, általában az egész arcra 10-15 perc a műveleti idő.



Ultraszong szonda (csak kozmetikai használatra)

1. Visszatérés a fő kezelőfelületre
2. Energiaszint csökkentése
Energiaszint tartománya: 1~10
3. Energiaszint megjelenítése
4. Energiaszint növelése
Energiaszint tartománya: 1~10
5. Idő kijelzése
A működési idő visszaszámlálása a működés indításakor megkezdődik. A készülék automatikusan leáll, ha az idő eléri a nullát.
6. Működési idő meghosszabbítása
Működési idő tartománya: 1~30 perc.
7. Működési idő lerövidítése
Működési idő tartománya: 1~30 perc.
8. Indítás/leállítás.
9. Megszakítás nélküli hullám
A kimenő energia folyamatos.
10. Szakaszos hullám
A kimenő energia pulzáló.
11. Vegyes hullámok
Váltakozás a folyamatos hullám és a szakaszos hullám üzemmód között.

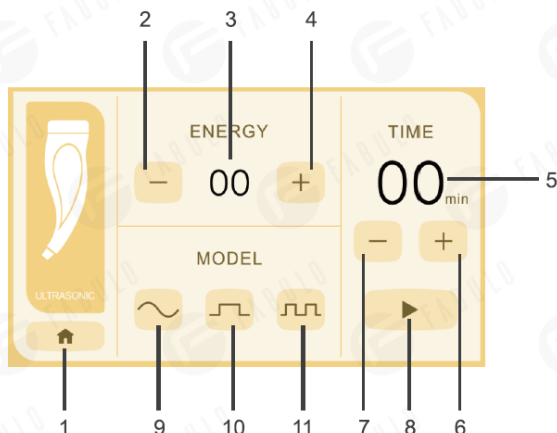

◆ Üzemeltetés módja

- 1) Állítsa be az energiaszintet és a működési idő hosszát. A beállítható maximális idő 30 perc.
- 2) Válassza ki a kimeneti energia üzemmódját.
- 3) Vegye elő az ultrahang fogantyút és kapcsolja be a Start gombot.
- 4) Az betervezett idő letelte után az ultrahang automatikusan leáll. Tisztítsa meg a fémszondát, és tegye vissza a tartozékok polcára.

- A kezelési művelet után a szondát 75%-os alkohollal fertőtlenítiük és megfelelően, száraz helyen tároljuk.

Megjegyzés: Ne áztassa vízbe a szonda fém részét.



Skin Scrubber

Üzemeltetési utasítások



Figyelmeztetés

- Ha a főegység be van kapcsolva, ne nyúljon a Skin Scrubber kimeneti csatlakozójához.
- A Scrubber nem kerülhet közvetlen érintkezésbe a szemmel.
- Tilos a következő személyek számára:
 - ① Allergiás betegek;
 - ② Égési sérülések, kidörzsölés, napégés, gyulladás vagy egyéb sebek;
 - ③ Szívbeteg, fertőző betegek, neurotikus páciensek és olyan betegek, akiknél fém található a szervezetben a kezelés során.
- A bőrsérülés elkerülése érdekében ne helyezze a működésben lévő Scrubber spatuláját óvatlanul a bőr egyetlen részére sem.
- Ha a bőrfelületen nem elegendő a krém a bőr megfelelő nedvességéhez, időben pótolja azt.
- A Scrubber használatakor ügyeljen rá, hogy milyen erővel és milyen szögben érinti a Scrubbert a bőrhöz.
- Munka közben ügyeljen a tartozékok és a főegység közötti kapcsolatra. Ne húzza túlzottan, hogy a csatlakozó vezeték ne essen ki.
- Munka közben ügyeljen arra, hogy a készüléket ne fröcskölje le víz vagy más korrozív hatású folyadék.
- Ne használja, ha a rozsdamentes acél felület a Scrubber hibája miatt deformálódott, hogy elkerülje a bőr károsodását.
- Ha bármilyen rendellenes helyzet adódik, forduljon az eladóhoz, és kérje meg a szervizelő személyzetet, hogy ellenőrizzék, ne nyissa ki a tokot engedély nélkül a karbantartás érdekében.



Vigyázat

- Mindig tartsa tisztán a Scrubbert, és minden használat után fertőtlenítsé 75%-os alkohollal.
- Ne tartsa egy helyen a bőrfelületen 5 másodpercet meghaladó ideig.

Ajánlott használati időtartam

Általában az egész arcra szánt műveleti idő 10-15 perc.


- A kezelés után sterilizálja a spatulát és a tartozék antisztatikus fedelét 75%-os alkohollal és tárolja száraz helyen.

Ne áztassa vízbe a tartozék fém részét.



Skin Scrubber

1. Visszatérés a fő kezelőfelületre
2. Energiaszint csökkentése
Energiaszint tartománya: 1~10
3. Energiaszint megjelenítése
4. Energiaszint növelése
Energiaszint tartománya: 1~10
5. Idő kijelzése

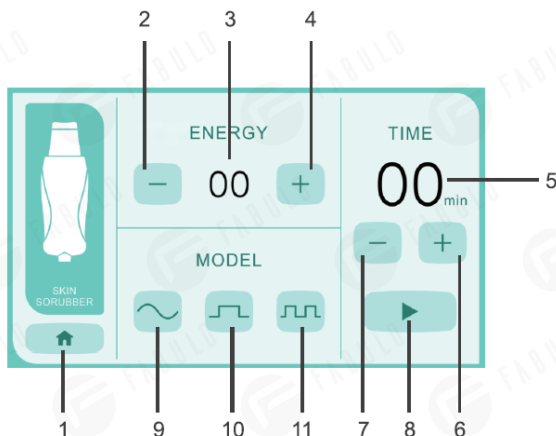

6. Működési idő meghosszabbítása
Működési idő tartománya: 1 ~ 30 perc.
7. Működési idő lerövidítése
Működési idő tartománya: 1 ~ 30 perc.
8. Indítás/leállítás.
9. Megszakítás nélküli hullám
A kimenő energia folyamatos.
10. Szakaszos hullám
A kimenő energia pulzáló.
11. Vegyes hullámok
Váltakozás a folyamatos hullám és a szakaszos hullám üzemmód között.

◆ Üzemeltetés módja

1. Állítsa be a teljesítményszintet és a munkaidőt, a leghosszabb idő 30 percre állítható;
2. Válassza ki a kimeneti üzemmódot;
3. Vegye elő a Skin Scrubbert, és nyomja meg a start gombot a használat elkezdéséhez;
4. Használat után tisztítsa meg és törölje szárazra a Skin Scrubbert, majd helyezze vissza a tartozékok polcára.

Megjegyzés: tegyen egy kis vizet a Skin Scrubber fém részére.

Amikor a Skin Scrubber működik, a víz azonnal elpárolog és ködöt képez.



Rádiófrekvencia

Üzemeltetési utasítások

Figyelmeztetés


- Használja az eszközt a megfelelő névleges feszültségen, és győződjön meg arról, hogy a csatlakozódugó teljesen be van dugva, ellenkező esetben áramütés fenyeget vagy tűz keletkezhet.
- Ne használja a fürdőszobában vagy egyéb nedves helyiségben, mert áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ne használja festés, mázolás helyszínén, oxigénnel dúsított helyeken, egyéb gyúlékony anyagok közelében és robbanásveszélyes helyeken.
- Ha nem használja ezt a funkciót, nyomja meg a leállítás gombot.
- Ezt a funkciót szívbetegségben, cukorbetegségben, pajzsmirigy-túlműködésben, rosszindulatú daganatokban, súlyos magas vérnyomásban, beültetett fémmel vagy pacemakerrel, epilepsziában és bőrrákban szenvedő betegek nem használhatják. Ha a terméket fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élő vagy tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) használják, a termék használatát gyámnak kell felügyelnie és irányítania, és felelősséget kell vállalnia a felhasználó biztonságaért. Akadályozza meg, hogy gyermekek használják a terméket és játékként kezeljék.
- Terhes nők, szoptató nők és menstruáló nők esetében a használata nem ajánlott.
- Ne használja sérült bőrrészekben és ízületeken, hogy ne befolyásolja a sebgyógyulást.
- Ezt a funkciót kizárólag kozmetikai célokra szabad használni.

Vigyázat

- Az égési sérülések elkerülése érdekében ajánlatos, hogy ne tartsa egy helyen 5 másodpercnél tovább.
- A kezelés során a szondával kerülje a szemgolyót és a pajzsmirigyet.
- A kezelési művelet után a szondát 75%-os alkohollal fertőtlenítsük és megfelelően száraz helyen tároljuk.
- Ez a funkció nem ajánlott olyan bőrfelületeken, ahol mesterséges töltőanyagokat, például szilikongélt fecskendeztek be.
- A funkció használata előtt ajánlatos az összes fém kiegészítőt eltávolítani.



Rádiófrekvencia

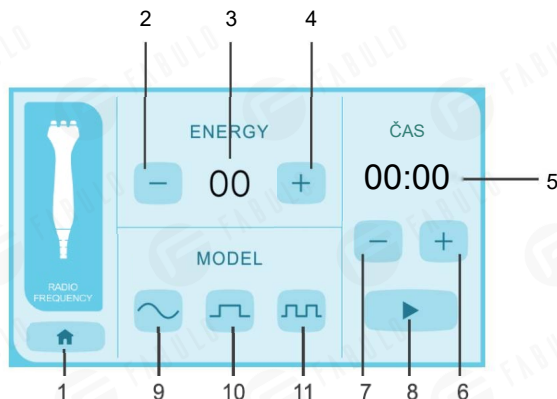

1. Visszatérés a fő kezelőfelületre
2. Energiaszint csökkentése
Energiaszint tartománya: 1 ~10
3. Energiaszint megjelenítése
4. Energiaszint növelése
Energiaszint tartománya: 1 ~10

5. Idő kijelzése

A működési idő visszaszámlálása a működés indításakor megkezdődik. A készülék automatikusan leáll, ha az idő eléri a nullát.

6. Működési idő meghosszabbítása

Működési idő tartománya: 1~30 perc.

7. Működési idő lerövidítése

Működési idő tartománya: 1~30 perc.

8. Indítás/leállítás.

9. Megszakítás nélküli hullám

A kimenő energia folyamatos.

10. Szakaszos hullám

A kimenő energia pulzáló.

11. Vegyes hullámok

Váltakozás a folyamatos hullám és a szakaszos hullám üzemmód között.

◆ Üzemeltetés módja

- 1) Állítsa be az energiaszintet és a munkaidőt, a leghosszabb idő 30 percre állítható;
- 2) Válassza ki a kimeneti üzemmódot;
- 3) Vegye elő a rádiófrekvenciás tartozékot és a használat megkezdéséhez nyomja meg a Start gombot;
- 4) Használat után tisztítsa meg a rádiófrekvenciás fémfejet, és tegye vissza a tartozékpolcra.



Dermabrázió

◆ Üzemeltetési utasítások



Figyelmeztetés

- Ez a funkció nem alkalmazható magas vérnyomásban, szívbetegségben és cukorbetegségben szenvedő betegeknél.
- Terhes nők, szoptató nők és menstruáló nők esetében a használata nem ajánlott.
- Tilos alkalmazni fertőző és daganatos betegeknél.
- Tilos olyan személyeknél alkalmazni, akik az elmúlt évben botox injekciót kaptak.
- Hegekkel rendelkező személyek és kollagénhiányban szenvedők ne használják ezt a funkciót, hogy elkerüljék a maradandó bőrkárosodást.
- Ezt a funkciót kizárólag kozmetikai célokra szabad használni.
- Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne férjenek hozzá a készülékhez, és ne kezeljék játékként, ezzel veszélybe sodorva magukat.




Vigyázat

- A kezelés előtt mérje fel a felhasználó bőrállapotát, majd válassza ki a megfelelő csiszolófejet és a megfelelő szívófejet.
- Az ápolás előtt ajánlott megtisztítani a bőrt és megszáritani a felesleges nedvességtől.
- A kezelés után tisztítsa meg az arcbőrt vízzel.
- A kezelési művelet után a csiszolófejet 75%-os alkohollal fertőtleníteni kell, és megfelelően, száraz helyen kell tárolni.



Dermabrázió

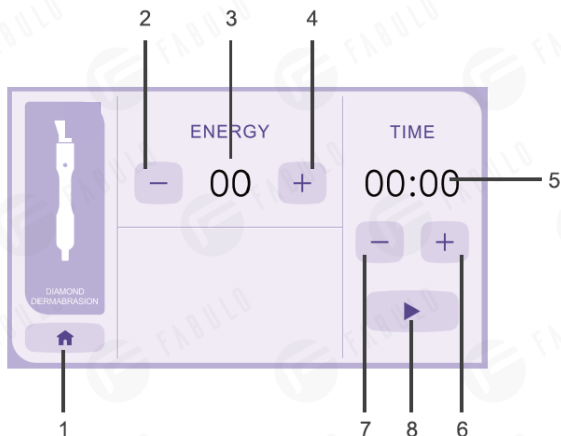

1. Visszatérés a fő kezelőfelületre

2. Energiaszint csökkentése

Energiaszint tartománya: 1~10

3. Energiaszint megjelenítése

4. Energiaszint növelése

Energiaszint tartománya: 1~10

5. Idő kijelzése

A működési idő visszaszámlálása a működés indításakor megkezdődik.

A készülék automatikusan leáll, ha az idő eléri a nullát.

6. Működési idő meghosszabbítása

Működési idő tartománya: 1 ~ 30 perc.

7. Működési idő lerövidítése

Működési idő tartománya: 1 ~ 30 perc.

8. Indítás/leállítás.

◆ Üzemeltetés módja

1)Állítsa be az energia fokozatát és a munkaidőt, a leghosszabb lehetséges időtartam 30 perc;

2) Válassza ki a kellő tartozékot, és rögzítse a szükséges csiszolófejet;

3) A készülék használatának megkezdéséhez nyomja meg a Start gombot;

4)Használat után tisztítsa meg a tartozékot, és tegye vissza a tartozékpolcra.

Funkciók ismertetése



Porlasztó



Vákuum

Üzemeltetési utasítások



Figyelmeztetés

- Ne használja a vákuum funkciót a szemén és a környező bőrön.
- Az alábbi személyeknek tilos a vákuumos és permetezési funkciók használata:
 - ① Allergiás páciensek;
 - ② Égési sérülések, kidőrszülés, napégés, gyulladás vagy egyéb sebek esetében.



Vigyázat

- Ha a készülék közvetlen indításakor nincs szívás, az normális jelenség. Várjon egy kicsit, amíg a készülék visszaáll a normál állapotba.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy az üvegszívószál nincs-e megrepedve vagy eltörve. Ilyen esetben a használata azonnal tilos, és az üvegszívószálat ki kell cserélni.
- Az üvegszívószálat nem lehet túl sokáig ugyanazon a bőrfelületen használni. Gyorsan mozgassa a szívótollat, hogy elkerülje a bőr sérülését.
- Ne csatlakoztassa a szórófejet a vákuum csatlakozójába, mert ha a bőrápoló termékek beszívódnak a légszivattyúba, károsíthatják a főegységet.
- Ne húzza túl erősen a tartozékot, hogy elkerülje a rongálódást.
- Használat után ki kell kapcsolni a készüléket.



*

Porlasztó



Vákuum

1. Visszatérés a fő kezelőfelületre

2. Energiaszint csökkentése

Energiaszint tartománya: 1 -10

3. Energiaszint megjelenítése

4. Energiaszint növelése

Energiaszint tartománya: 1 ~10

5. Idő kijelzése

A működési idő visszaszámlálása a működés indításakor megkezdődik.

A készülék automatikusan leáll, ha az idő eléri a nullát.

6. Működési idő meghosszabbítása

Működési idő tartománya: 1 ~ 30 perc.


7. Működési idő lerövidítése

Működési idő tartománya: 1 ~ 30 perc.

8. Indítás/leállítás.

9. Vákuum üzemmód

10. Porlasztó üzemmód

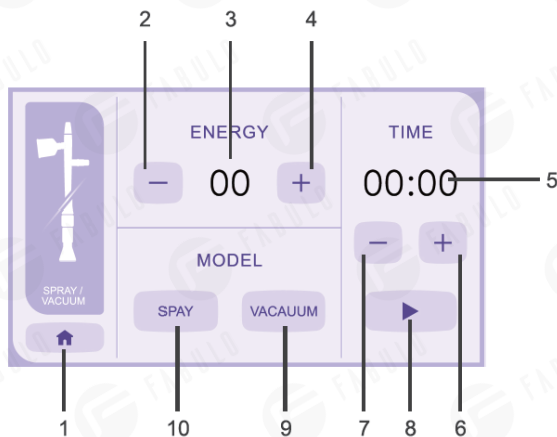

◆ Üzemeltetés módja

1) Válassza ki a porlasztó eszközt vagy a vákuum eszközt. Ha a porlasztó eszközt

használja, ügyeljen arra, hogy elegendő-e a palackban lévő víz mennyisége;

2) Állítsa be az energia fokozatát és a munkaidőt, a leghosszabb lehetséges időtartam 30 perc;

3) Vegye elő a tartozékot, és rögzítse a szükséges szívófejet;

4) A készülék használatának megkezdéséhez nyomja meg a Start gombot;

5) Használat után tisztítsa meg a tartozékot, és tegye vissza a tartozékpalcra.

Ajánlott használati idő

Normál körülmények között a folyamatos vákuumozás és porlasztás ideje nem haladhatja meg a 10 percet.



Nagyfrekvenciás elektroterápia

Üzemeltetési utasítások




Figyelmeztetés

- Tilos megérinteni a nagyfrekvenciás elektroterápiás tartozék kimeneti csatlakozóját a kozmetikai készülék hátlapján vagy a nagyfrekvenciás elektroterápiás fogantyú csatlakozóját, amikor a főegység be van kapcsolva.
- Ne irányítsa a csövet közvetlenül a szem felé, és ne érintse a szem környékéhez.
- Ezt a funkciót a következő személyek vagy testfelületek esetében tilos használni:
 - ① Terhes nők és szívritmus-szabályozóval rendelkezők.
 - ② Érendszeri betegségekben és nagymértékű bőrzékenységekben szenvedők.
 - ③ Olyan személyek, akiknek a testben fém implantátum vagy fém alkatrész fogpótlás van behelyezve.
 - ④ Bőrsérülésekkel rendelkező személyek vagy más bőrbetegségekben szenvedők.
 - ⑤ Sűrű szőrzettel/hajjal borított testrészek.
- Ne használjon alkoholt tartalmazó készítményeket, mivel az alkohol nagyon gyúlékony. Ha alkohol alapú bőrtonizálóra van szükség, csak a készülék használata után vigye fel.
- Működés közben ne fogja meg a kezelővel a nagyfrekvenciás fogantyú és az elektródacső közötti csatlakozást, nehogy áramütést szenvedjen.
- Ne tartsa egy helyen a bőrfelületen 5 másodpercet meghaladó ideig.
- Ezt a funkciót kizárólag kozmetikai célokra szabad használni.



Vigyázat

- Használat előtt ellenőrizze, hogy az elektródacső vagy a csövön lévő fémfej nem laza-e, és hogy az elektródacső nem repedt vagy sérült-e. Ha igen, ne használja, és azonnal cserélje ki az elektróda csövet.
- Az elektródacső behelyezése vagy eltávolítása előtt az áramerősséget fokozatosan nullára kell csökkenteni és a főkapcsolót ki kell kapcsolni.
- Az elektródacső behelyezésekor vagy kihúzásakor először vegyen fel gumikesztyűt, és tartsa az elektróda csövet hüvelyk- és mutatóujjával: dugja be a csövet a nyílás aljába, amíg nem rögzül, és ne nyomja a csövet a tenyerével, hogy elkerülje a törést és sérülést; Tilos erőteljesen húzni, nehogy az elektródacsövön lévő fémfej leessen vagy eltörjön, ami sérülést okozhat.

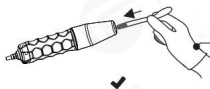

KÖTELEZŐ gumikesztyűt felvennie, hüvelyk- és mutatóujjával fogja meg, majd határozottan helyezze be az elektróda csövet.




KÖTELEZŐ gumikesztyűt felvennie, ne nyomja tenyerével az elektróda csövet.

- Használat közben az elektroterápiás csőből kilépő nagyfeszültségű áram interferenciát okoz.
- A nagyfrekvenciás elektroterápiás eszközzel tilos a készülék főegységéhez közelíteni és más kozmetikai elektromos készülékeket megközelíteni. Ha megzavarja a főegységet, az a készülék hibás működését vagy megrepedését okozhatja.
- Ha az elektródacső 2,5 cm-nél kisebb távolságra van a bőrtől, de nem érintkezik a bőrrel, azonnal csökkenteni kell az áramerősséget, ha a képződő szikrák irritálják a bőrt. Ha az ügyfél a fenti művelet után is szikrát érez, helyezzen egy kis darab száraz pamut kendőt az ügyfél arcára (nejlon vagy más szintetikus szálak nem megengedettek).
- Használat közben mindig tartsa az elektródát az ügyfél bőrén. Nagyfrekvenciás indirekt kezelés: a műszer be- és kikapcsolásakor az egyik kezének mindig érintkeznie kell az ügyfél bőrével, ezt soha ne tegye anélkül, hogy megérintené az ügyfél bőrét. Mindkét fél érzi az áramot, ami kényelmetlenséget okoz.
- Használat után először ki kell kapcsolni a készüléket, ki kell húzni az elektróda csövet a nagyfrekvenciás fogantyúból, majd fertőtlenítés és szárítás után visszatenni a tartozékdobozba.



Nagyfrekvenciás elektroterápia

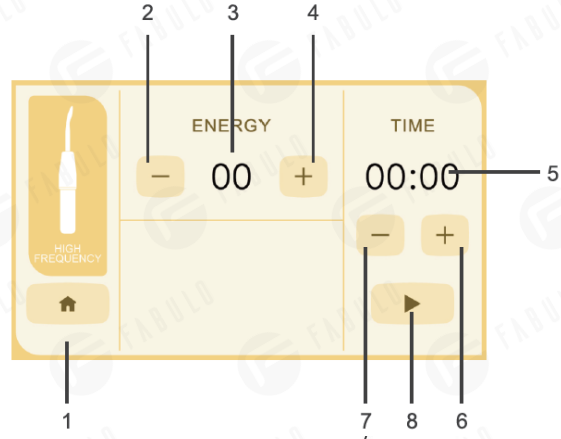

1. Visszatérés a fő kezelőfelületre
2. Energiaszint csökkentése
Energiaszint tartománya: 1~10
3. Energiaszint megjelenítése
4. Energiaszint növelése
Energiaszint tartománya: 1~10
5. Idő kijelzése

A működési idő visszaszámlálása a működés indításakor megkezdődik. A készülék automatikusan leáll, ha az idő eléri a nullát.

6. Működési idő meghosszabbítása
Működési idő tartománya: 1 ~ 30 perc.
7. Működési idő lerövidítése
Működési idő tartománya: 1 ~ 30 perc.
8. Indítás/leállítás.

◆ Üzemeltetés módja

- 1) Állítsa be a kimeneti fokozatot és a munkaidőt, a leghosszabb idő 30 percre állítható;
- 2) Vegye elő a fogantyút és szerelje fel a szükséges elektródacsövet;
- 3) Indítsa el a funkciót a Start gomb megnyomásával;
- 4) A betervezett időtartam után a tartozék leáll, távolítsa el az elektródacsövet, tisztítsa meg és törölje le a nagyfrekvenciás elektroterápiás tartozék szondáját, majd tegye vissza a tartozékpalcra.

Megjegyzés: Ne áztassa vízbe az elektroterápiás tartozék fém részeit.

Ajánlott használati idő

Zsíros bőr: 10-15 percig ajánlott használni;
Száras és dehidratált bőr: 3-5 perc javasolt.



Forgó kefe

◆ Üzemeltetési utasítások



Figyelmeztetés

- Ne használja a szem alatti területeken.
- A következő csoportok számára tilos a kefe funkció használata:
 - ① Allergiás páciensek;
 - ② Égési sérülések, kidőrszólás, napégés, gyulladás vagy egyéb sebek esetében.




Vigyázat

- Használat előtt ellenőrizze, hogy a kefefej szilárdan be van-e nyomva a kefe nyelébe.
- Ne használja a kefét, miközben a kefefejet fogja.
- Ne csatlakoztassa vagy cserélje ki a kefefejet a készülék működése közben.
- Ne használja a kezét vagy más tárgyat a kefe erőszakos elforgatásához.
- Ne használja a kefe funkciót hosszú ideig, hogy elkerülje a kefe nyelének túlmelegedését.
- Fordítsa lefelé a kefefejet, mielőtt megérintené az ügyfél bőrét. Az ügyfél arcbőrének megérintésekor használjon mérsékelt erőt, hogy ne okozzon kellemetlen érzést.



Forgó kefe

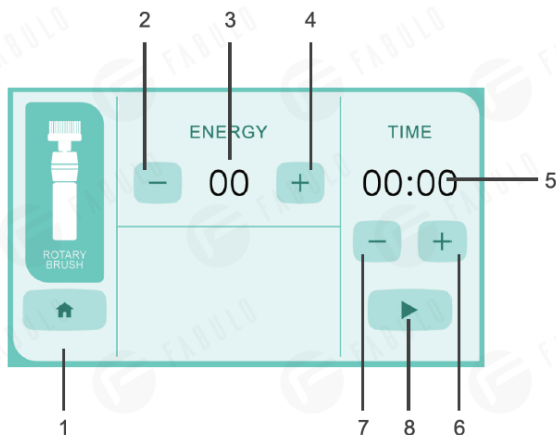

1. Visszatérés a fő kezelőfelületre

2. Energiaszint csökkentése

Energiaszint tartománya: 1 ~10

3. Energiaszint megjelenítése

4. Energiaszint növelése

Energiaszint tartománya: 1 ~10

5. Idő kijelzése

A működési idő visszaszámlálása a működés indításakor megkezdődik.
A készülék automatikusan leáll, ha az idő eléri a nullát.

6. Működési idő meghosszabbítása

Működési idő tartománya: 1 ~ 30 perc.

7. Működési idő lerövidítése

Működési idő tartománya: 1 ~ 30 perc.

8. Indítás/leállítás.

◆ Üzemeltetés módja

1) Állítsa be az energiaszintet és a munkaidőt, a leghosszabb idő 30 percre állítható;

2) Válassza ki a tartozékot és rögzítse a szükséges kezelőfejet;

3) A készülék használatának megkezdéséhez nyomja meg a Start gombot;

4) Használat után tisztítsa meg a tartozékot, és helyezze vissza a tartozékpalcra.

Ajánlott használati idő

Állítsa be az időtartamot az adott bőr állapotának megfelelően. Általában az időtartam nem haladhatja meg a 10 percet.



Galvanikus görgős pálca



Galvanikus kézi pálca

◆ Üzemeltetési utasítások



Figyelmeztetés

- Ne helyezze a görgőt közvetlenül a szemgolyóra, ne érintse meg közvetlenül a szemhéjat sem.
- Ezt a funkciót a következő személyek vagy testfelületek esetében tilos használni:
 - ① Terhes nők, személyek fémtárgyakkal a testükben;
 - ② Allergiás és daganatos betegek;
 - ③ Égési sérülések, kidörzsölés, napégés, gyulladás vagy egyéb sebek;
 - ④ Kítágult hajszálerekkel rendelkező emberek.
- Tilos erősen alkalikus oldatok használata a negatív kémiai károsodások elkerülése érdekében.
- Ezt a funkciót kizárólag kozmetikai célokra szabad használni.



Vigyázat


- A bőrápoló termékek savasságát és lúgosságát a henger pozitív és negatív pólusával összhangban kell használni. Ha a henger pozitív, a betöltött folyadék savas (+); Ha a görgő negatív, az bevezetett folyadék lúgos (-), például ha olyan bőrápoló termékeket választ, amelyeken nincs közvetlenül savas-lúgos jelölés, vásárolhat PH tesztpapírt.
- Használat közben ne érintse meg közvetlenül a görgőt a kézi pálccával. Ha az érintkezés gondatlan, a főegység aktiválja az automatikus védelmet és leválasztja a kimenetet.
- Ha az ügyfélnek megvastagodott bőrfelülete van, azt először le kell radírozni, majd a művelet előtt egyenletesen kell felvinni az alkalmazott anyagot a kezelés helyére.
- Különböző anyagok (két vagy több szer) nem vihetők fel együtt vagy egymás után ugyanarra a helyre, függetlenül attól, hogy azonos töltetűek.
- Normál körülmények között az ionimport hatása fordítottan arányos a bevitt anyag molekulatömegével, ami azt jelenti, hogy minél nagyobb a molekulatömeg, annál rosszabb a hatékonyság és minél kisebb a molekulatömeg, annál jobb a bejuttatási effektus.



Galvanikus görgős pálca



Galvanikus kézi pálca

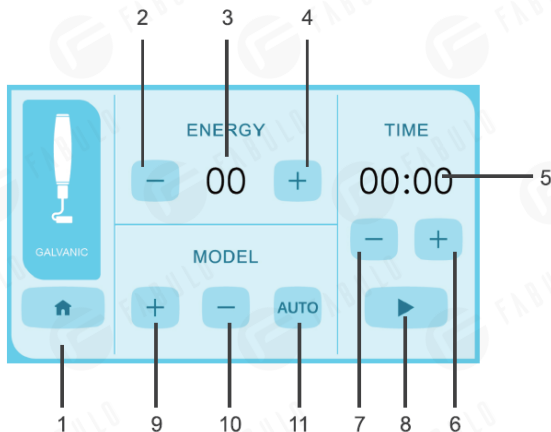

1. Visszatérés a fő kezelőfelületre
2. Energiaszint csökkentése
Energiaszint tartománya: 1—10
3. Energiaszint megjelenítése
4. Energiaszint növelése
Energiaszint tartománya: 1—10
5. Idő kijelzése

A működési idő visszaszámlálása a működés indításakor megkezdődik.
A készülék automatikusan leáll, ha az idő eléri a nullát.

6. Működési idő meghosszabbítása
Működési idő tartománya: 1 ~ 30 perc.
7. Működési idő lerövidítése
Működési idő tartománya: 1 ~ 30 perc.
8. Indítás/leállítás.
9. Pozitív mikroáramú kimeneti üzemmód
pozitív mikroáram jel.
10. Negatív mikroáramú kimeneti üzemmód
negatív mikroáram jel.
11. A vegyes kimeneti üzemmód periodikusan vált a pozitív és negatív mikroáramú kimenet között.

◆ Üzemeltetés módja

- 1) Állítsa be a teljesítményszintet és a munkaidőt, a leghosszabb idő 30 percre állítható;
- 2) Válassza ki a kimeneti üzemmódot;
- 3) Vegye elő a galvanikus tartozékot, és adja a vendég kezébe a kézi pálcát, hogy megfogja;
- 4) A készülék használatának megkezdéséhez nyomja meg a Start gombot;
- 5) Használat után tisztítsa meg a tartozékot, és helyezze vissza a tartozékállványra.

Ajánlott használati idő

- ① A behatólító ápolás időtartama: anionos művelet 2 perc, majd kationos művelet 6 perc;
- ② A vízkömentesítés időtartama: anionos művelet 6 perc és kationos művelet 2 perc.

Funkciók ismertetése



RES üzemmód



CAP üzemmód



Negatív tábla

◆ Üzemeltetési utasítások



Figyelmeztetés

- Ez a funkció nem alkalmas magas vérnyomásban, szívbetegségben és cukorbetegségben szenvedő betegek számára.
- Nem alkalmas szoptató és menstruáló nők számára.
- Fertőző betegségekben vagy daganatos betegségekben szenvedő betegek nem használhatják.
- Ezt a funkciót kizárólag kozmetikai célokra szabad használni.
- Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne férjenek hozzá a készülékhez, és ne kezeljék játékként, ezzel veszélybe sodorva magukat.
- Használat közben a kezelőfeje ne maradjon ugyanabban a helyzetben, hogy elkerülje a égést.



Vigyázat


- A kezelés előtt figyeljen oda arra, hogy a csatlakozókábel, a tápkábel csatlakozódugója és a szonda teljesen be van-e nyomva és rögzítve.
- A kezelés előtt válassza ki a megfelelő energiaszintet és szondát.
- Ne maradjon túl sokáig a bőr ugyanazon területén, hogy elkerülje az égést.
- A kezelési művelet után a szondát 75%-os alkohollal fertőtlenítiük és megfelelően száraz helyen tároljuk.
- Kezelés előtt megfelelő gélt vagy esszenciát kell felvinni a testrészekre, hogy nedvesítse a bőrt.
- Az összes elektródát helyezze mérsékelt erővel teljesen érintkezésbe a vendég bőrével, hogy elkerülje a bőr bizsergését vagy az áram aggregációja által okozott vörös foltokat.
- Az emberi impedancia azonosító funkcióval rendelkező eszköz csak jó érintkezéskor tudja elindítani a kimenő jelet.

◆ Biztonsági óvintézkedések a telepítés során

- Az F-365 multifunkciós kozmetikai készülék egy negatív lemezt, két fogantyút és két szondát tartalmaz.
- A RES rezisztív mód fogantyúja piros karikával van jelölve, és csak a rozsdamentes acél szondával szabad felszerelni.
- A kék kör alakú logóval ellátott CAP kapacitív mód fogantyúját csak a fekete szondával szabad felszerelni.
- Mindkét szonda csapja eltérő átmérőjű, ezért szükséges a fogantyúnak megfelelő szondát helyesen beilleszteni. Ha a szondát nem megfelelően illeszti, az azt eredményezi, hogy a szondát nem lehet felszerelni, vagy a szonda meglazul és könnyen leesik, tehát nem lehet párosítani.




RES üzemmód

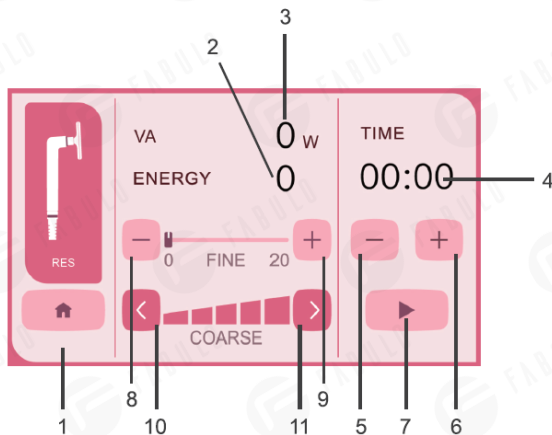

1. Visszatérés a fő kezelőfelületre
2. Valós idejű teljesítmény kijelzése;
A fogantyú és a negatív lemez egy hurkot képez a tényleges kimeneti teljesítmény megjelenítéséhez.
3. Kimeneti tartomány kijelzése
A beállított tartományt jeleníti meg 0 és 100 között.
4. Idő kijelzése
A működési idő visszaszámlálása a működés indításakor megkezdődik.
A készülék automatikusan leáll, ha az idő eléri a nullát.
5. Működési idő lerövidítése
Működési idő tartománya: 1~60 perc.
6. Működési idő meghosszabbítása
Működési idő tartománya: 1~60 perc.
7. Indítás/leállítás.
8. A kimeneti szint finomhangolású csökkentése
20 fokozatban állítható
9. A kimeneti szint enyhe növelése
20 fokozatban állítható
10. Durva igazítás, csökkentés.
5 fokozatban állítható, minden fok 20 fokkal finomhangolható.
11. Durva igazítás, növelés
5 fokozatban állítható, minden fok 20 fokkal finomhangolható.

◆ Üzemeltetés módja

- 1) Állítsa be az időt és a kimeneti szintet;
- 2) Vegye elő a fogantyút, és szerelje be a rozsdamentes acél szondát;
- 3) Miután a vendég megérintette a negatív lemezt, nyomja meg a start gombot a funkció bekapcsolásához;
- 4) Az időtartam lejártá után a tartozék leáll, távolítsa el a szondát, majd törölje le, és tegye vissza a fogantyút és a szondát a tartozékok polcára.

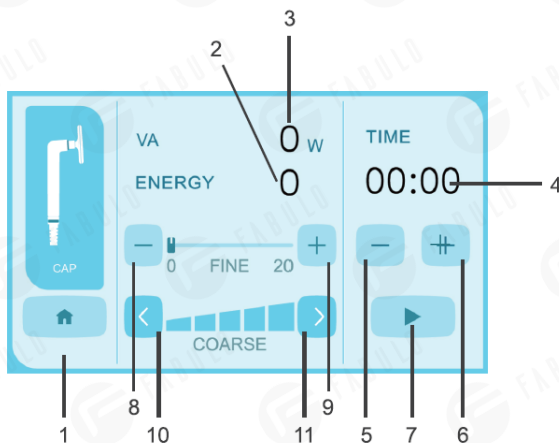

1. Visszatérés a fő kezelőfelületre

2. Valós idejű teljesítmény kijelzése;
A fogantyú és a negatív lemez egy hurkot képez a tényleges kimeneti teljesítmény me

3. Kimeneti tartomány kijelzése
A beállított tartományt jeleníti meg 0 és 100 között.

4. Idő kijelzése

A működési idő visszaszámlálása a működés indításakor megkezdődik.
A készülék automatikusan leáll, ha az idő eléri a nullát.

5. Működési idő lerövidítése

Működési idő tartománya: 1~60 perc.

6. Működési idő meghosszabbítása

Működési idő tartománya: 1~60 perc.

7. Indítás/leállítás.

8. A kimeneti szint finomhangolású csökkentése.

20 fokozatban állítható

9. A kimeneti szint enyhe növelése.

20 fokozatban állítható

10. Durva igazítás, csökkentés.

5 fokozatban állítható, minden fok 20 fokkal finomhangolható.

11. Durva igazítás, növelés

5 fokozatban állítható, minden fok 20 fokkal finomhangolható.

◆ Üzemeltetés módja

1) Állítsa be az időt és a kimeneti szintet;

2) Vegye elő a fogantyút, és helyezze be a fekete szondát;

3) Miután a vendég megérintette a negatív lemezt, nyomja meg a start gombot a funkció bekapcsolásához;

4) Az időtartam lejártá után a tartozék leáll, távolítsa el a szondát, majd törölje le, és tegye vissza a fogantyút és a szondát a tartozékok polcára.

Problémák megoldása

Hogyan nyilvánul meg a rendellenesség	Ok	Megoldás
A főegység nem működik vagy kiesik.	1. Nincs tápellátás	1. Ellenőrizze, hogy nincs-e kiégett biztosíték a tápegység biztosítékkezesében. Ha kiégett, cserélje ki a megfelelő specifikációjú új biztosítékra. Nyomja meg a start gombot, bekapcsolás után a gomb világít.
	2. A tápkábel nincs megfelelően bedugva vagy csatlakoztatva.	2. Dugja be vagy csatlakoztassa megfelelően a tápkábelt.
A kijelző nem működik.	1. Nincs tápellátás	1. Helyezze áramellátás alá, kapcsolja be.
A tartozék szondája nem működik.	1. Csatlakozó gyenge érintkezése.	1. Húzza ki a kimeneti kábelt, majd csatlakoztassa újra a dugaszt.
Gyenge teljesítmény a hideg-meleg kalapács, ultrahang, scrubber, RF, galvanizálás és egyéb tartozékok esetében.	1. A csap helyzete nincs megfelelően beállítva; 2. A tartozékok magas hőmérséklete alacsony teljesítményhez vezet.	1. Állítsa a pozíciót magasra; 2. Megfelelő használat, ne kapcsolja be hosszú időre. Ha nem használja a tartozékot, kapcsolja ki a főkapcsolót.
A dermabrázió gyenge szívással rendelkezik.	1. A csap helyzete nincs megfelelően beállítva; 2. Blokk a dermabrázió belsejében; 3. A levegőcső elöregedése; 4. A levegőcső és a szívótoll közötti illesztés meglazult.	1. Állítsa be a helyzetét és állítsa be a levegőszabályozó szelepet; 2. Cserélje ki a dermabráziós tartozékot; 3. Cserélje a levegőcsövet újra, és helyezze be a csatlakozóba.
Gyenge permetező hatású porlasztó.	1. A csap helyzete nincs megfelelően beállítva; 2. A vízutántöltő a készülék belsejében eltömődött; 3. A levegőcső elöregedése; 4. A levegőcső és a vízutántöltő berendezés közötti illesztés laza; 5. Nincs elég víz a palackban.	1. Állítsa a pozíciót magasra; 2. Cserélje ki a vízutántöltő berendezés tartozékait; 3. Cserélje a levegőcsövet újra, és helyezze be a csatlakozóba. 4. Ügyeljen a palack víztartalmára, és időben tölts fel a vizet.
A szívótoll szippantóereje gyenge.	1. A csap helyzete nincs megfelelően beállítva; 2. A toll szívócsőve eltömődött; 3. A levegőcső elöregedése; 4. A levegőcső és a szívótoll közötti illesztés laza.	1. Állítsa a pozíciót magasra; 2. Cserélje ki a szívótoll tartozékot; 3. Cserélje a levegőcsövet újra, és helyezze be a csatlakozóba.
A nagyfrekvenciás elektroterápia teljesítménye gyenge.	1. A csap helyzete nincs megfelelően beállítva; 2. Elöregedés az elektroterápiás pálcá hosszú távú használata után.	1. Állítsa a pozíciót magasra; 2. Cserélje ki az elektroterápiás tartozékokat.
A főegység rezgése.	1. A tartozék blokkolva van.	1. Ellenőrizze, hogy a megfelelő tartozék levegőcsőve nincs-e eltömődve.

Amennyiben a probléma a fenti műveletek után sem oldódik meg, a helyreállítás érdekében lépjen kapcsolatba a szervizközponttal vagy a forgalmazóval.



Ne dobja a régi vagy hibás készülékeket a háztartási hulladék közé;
csak az előírásoknak megfelelő gyűjtőhelyeken szabad leadni.

▲ Használat előtt ellenőrizze a termék specifikációját. Ez a kézikönyv csak referenciaként szolgál. A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.